


Fonctionnement

Le repose-poignets situé devant le plateau de lecture permet un accès facile aux boutons de contrôle et assure la stabilité au plateau de lecture.

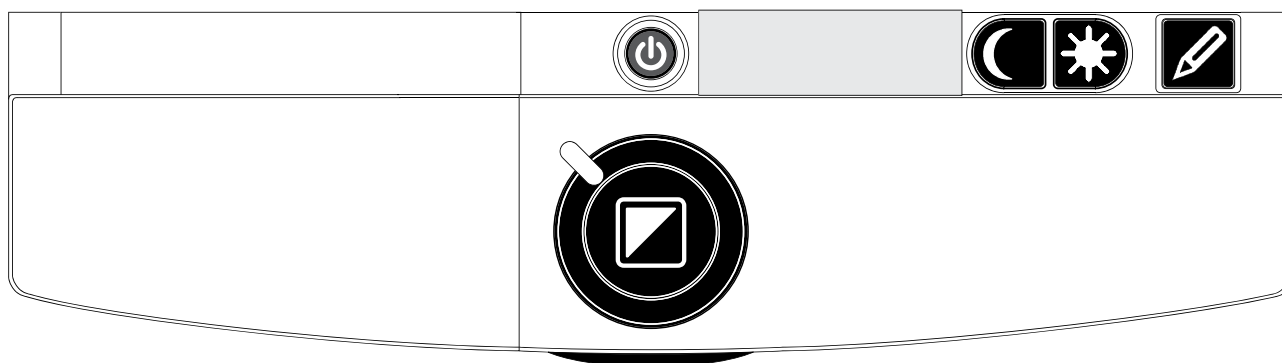


Interrupteur On / Off




Appuyez sur la touche On / Off pour allumer le système et son moniteur.

Sélection du mode de visualisation

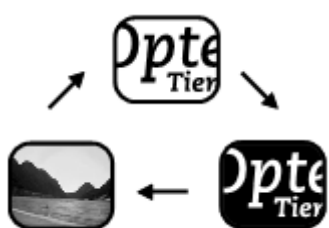

Ce bouton vous permet de sélectionner parmi trois modes de visualisation différents.

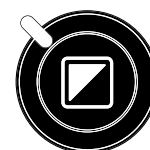

1. **Mode photo couleur ou dans l'échelle de gris.**
2. **Mode lecture** : les textes et les images seront affichés en noir et blanc.
3. **Mode lecture inversé** : ce mode vous permet d'inverser la sélection de combinaison de couleur de l'avant et de l'arrière-plan.

Réglage du grossissement

Tournez le bouton zoom, qui se trouve au centre du plateau, dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le grossissement, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le grossissement.



Éclairage On / Off

Pour éteindre l'éclairage, appuyez sur cette touche pendant 4 secondes. Cela peut faciliter la lecture de documents et de magazines en format papier glacé. L'éclairage se rallumera si un changement au mode de visualisation est effectué, ou lorsque vous appuyez sur la touche d'éclairage On / Off pendant 4 secondes.



Réglage de l'affichage des images

Pour ajuster l'affichage des images, appuyez sur cette touche, tout en maintenant soit sa partie droite ou gauche bien enfoncée. À l'aide de cette touche, vous pouvez, ainsi, ajuster la clarté ou la netteté des caractères ou des autres éléments affichés.



Réglage de la luminosité

Pour ajuster la luminosité, appuyez sur la partie droite ou gauche de la touche d'ajustement, tout en maintenant la touche de mise au point automatique bien enfoncée.



Affichage des renseignements du système à l'écran

Pour visualiser les renseignements du système, appuyez sur la touche de mise au point automatique




pendant 4 secondes. Cela vous permet de voir affichés à l'écran le niveau de grossissement ainsi que la configuration du système. Si vous appuyez sur cette touche de nouveau, l'écran reprendra son fonctionnement habituel.

Verrouillage du plateau de lecture

Soulevez légèrement le levier rouge situé sur le devant du plateau afin d'y empêcher tout mouvement.

Cette fonction vous permet de verrouiller le plateau dans une position stable. Cela facilite, ainsi, les activités d'écriture et de peinture lorsque vous utiliser le plateau de lecture. Pour annuler le verrouillage du plateau, il suffit de soulever de nouveau le levier.

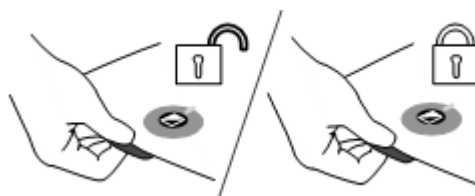

Remarque : lorsque le système est éteint, le verrouillage est automatiquement activé (en position verrouillage). Lorsque vous allumez votre système ClearView, le verrouillage est annulé (en position déverrouillage). Assurez-vous que le plateau de lecture est bien centré avant d'éteindre le système.